

整形外科、整骨院、リハビリテーション  
鍼灸治療院、透析施設、産婦人科で・・・

一般医療機器 届出番号:24B3X00004000004



タオルウォーマー

# Barrier Hot medical バリアホット

## タオルウォーマーで温める温熱剤



手首・肘に

タオルウォーマーで  
温めるだけで  
使用ができる



肩・首に

保温性に優れ、  
柔らかく  
身体にフィット



胸・お腹に



専用カバー付き



腰・背中に

耐熱性  
耐バリア性に  
優れた抗菌  
加工フィルム



脚・膝に

製造販売元

### 三重化学工業株式会社

〒515-0001 三重県松阪市大口町262-1  
TEL0598-51-2361 FAX0598-51-1143  
www.miekagaku.co.jp

# タオルウォーマーで温めるから・・・安全・簡単・低コスト!!



## ホットパックを温めるとき・・・

- お湯で温める加温機は大き過ぎて設置場所が・・・
- 費用も負担に・・・
- お湯の交換やパックに付いたお湯を拭くのも・・・
- 電子レンジは簡単だけど、爆発の恐れがあるし・・・

※バリアホットは透析現場の看護師の声から誕生しました!



## タオルウォーマーで温めるから・・・

- 設置場所を選ばない!
- 低コスト!
- タオルウォーマーが汚れにくい!
- パックをタオルで拭かなくても良い!
- 爆発の恐れはない!

POINT!



届出番号:24B3X00004000004

品番:MBH-001

## バリアホット

- サイズ:180mm×260mm  
約700g
- JAN: 4978797400128
- 1ケース:1個入り×10函
- 定価:1,800円(税別)
- 温熱剤:日本製
- カバー:中国製



専用カバー付き

### 使用方法



電子レンジや湯煎等のご使用できません。タオルウォーマー専用です。

- ①タオルウォーマーの電源を入れてください。
- ②タオルウォーマーが温まったらバリアホットを庫内に入れ3～4時間ほど温めてください。
- ③タオルウォーマーの能力・バリアホットの数量によって適温までの加熱時間は変化しますので、温かさを確認しながら加熱してください。
- ④加熱されたバリアホットを取り出し、付属のカバーに入れてください。  
※加熱された本品を取り出す際、付属のカバーに入れる際には火傷をしないようご注意ください。  
※カバーに入れる前に本品に破損、液漏れが無いか確認してください。
- ⑤カバーに入れたバリアホットを、患部にあてがい、適宜の時間患部を温めてください。
- ⑥使用後はカバーから取り出し、汚れ、破損等の確認を行った後タオルウォーマーで再度加熱してください。  
※続けてご使用にならない場合は、汚れ、破損等の確認後、本品が十分冷めてから冷暗所に保管してください。