

一般医療機器

# ホットパック - mie

**快適** 保温性に優れ、柔らかく身体にぴったりフィット。


**安心** 柔軟性耐熱フィルム使用。

**清潔** 表装フィルムは洗浄が簡単&防カビ加工も。

## 選べる3タイ



使用前  
使用后(5分)

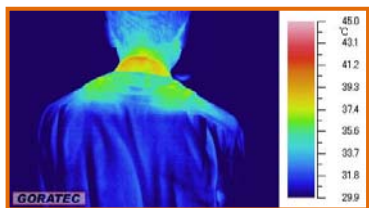

## 使い方いろいろ!!



三重化学工業株式会社

〒515-0001 三重県松阪市大口町262-1  
TEL 0598-51-2361 FAX 0598-51-1143  
<http://www.miekagaku.co.jp>

# 選べる3タイ

届出番号 24B3X00004000001

## ホットパック-mie H-1

(頸部・腕脚用)

サイズ 400mm×180mm 約450g  
1ケース 1個入り×10函 定価 2,300円 (税別)



届出番号 24B3X00004000002

## ホットパック-mie H-2

(腰部・肩首用)

サイズ 430mm×225mm 約750g  
1ケース 1個入り×10函 定価 2,900円 (税別)



届出番号 24B3X00004000003

## ホットパック-mie H-3

(腰部・背中用)

サイズ 450mm×280mm 約1300g  
1ケース 1個入り×5函 定価 4,600円 (税別)



### 使用方法

- ①加温槽に65℃～75℃に温めたお湯をご用意ください。
- ②お湯の温度を65℃～75℃に保ち、本品をお湯に沈め10分～25分間温めてください。
- ③本品に損傷など無く液漏れが無いことを確認し、タオルなどで包み患部に当てがい適宜時間（15分～25分）患部を温めてください。火傷をしないように、十分ご注意ください。
- ④取扱いに際しましては、取扱い説明書をよくお読みください。

温め方	時間
お湯 65～75℃	10～25分